

Surge Guide

Planejamento de cirurgia ortognática

Entenda o fluxo do planejamento de cirurgia ortognática

- 1 - Pedido no site
- 2 - Envio da documentação
- 3 - Cefalometria 3D
- 4 - Videoconferência de planejamento
- 5 - Guias

Documentação necessária: tomografia de face, modelos e fotografias.

Atenção: A documentação precisa ser mais atual possível. Nenhuma intervenção em dentes pode ser realizada no intervalo entre a aquisição e cirurgia.

Tomografia de face:

Tomografia Cone Beam ou Multislice

Limites em tecido mole:

- altura: glabella a mento
- largura: tragus direito a tragus esquerdo
- profundidade: ponta de nariz a pório

Arquivo em formato DICOM multislice

Aquisição única (não é possível unir duas aquisições)

Tamanho máximo voxel 0,5mm

Paciente em oclusão ou relação cêntrica (a critério do cirurgião responsável)

Sem mentonera (se possível)

Modelos

Modelos em gesso: Os modelos de trabalho (não zocalados) devem ser enviados para Compass3D, com as marcações da oclusão pretendida no pós cirúrgico.

Escaneamento de modelo: Os arquivos devem estar em formato ".stl" e na posição da oclusão pós cirúrgica.

Escaneamento intra-oral: Os arquivos devem estar em formato ".stl" e a oclusão pós cirúrgica vai ser determinada com a manipulação dos arquivos digitais, durante o planejamento.

Atenção: para arcada segmentada (modelo de gesso e escaneamento do modelo) é necessário a arcada original e a segmentada (em posição de oclusão final junto ao antagonista). Para escaneamento intra oral a segmentação vai ser realizada de forma digital durante o planejamento.

Fotos: frontal em repouso, frontal sorriso e perfil direito em repouso.

Prazos

Cefalometria 3D: Enviada por e-mail em até 3 dias úteis, após finalização do pedido no site e envio da documentação completa.

Planejamento: A videoconferência pode ser agendada após 3 dias úteis da finalização do pedido no site e envio da documentação completa.

Guias: Após a finalização do planejamento a guia é produzida em até 3 dias úteis e entregue para a transportadora. O prazo de entrega pode variar para localidade e frete contratado.

Relatórios: Os relatórios são enviados em até 3 dias úteis, após o planejamento, para casos sem guia e em até 5 dias úteis para casos com guia.

Valores

Planejamento: R\$ 500,00*

Guia Intermediária: R\$ 1.000,00*

Guia final: R\$ 500,00*

Guia de posicionamento de mento: R\$ 1000,00*

Escaneamento de modelos: R\$ 120,00*

Escaneamento intra-oral: R\$ 220,00*

*Valores sujeitos a alterações.

Dúvidas e agendamento de videoconferência, entre em contato!

☎ 0800 601 7277

📧 @compasscomvoce

✉ contato@compass3d.com.br

📍 Av. Carandaí, 161 - 2º andar, Funcionários / BH - MG

📱 /compasscomvoce

🌐 www.compass3d.com.br